

ResMed

Dopasowanie maski AirFit F20 – przewodnik



- Rozpocznij od upewnienia się, że klipsy magnetyczne na dolnych paskach nie są zapięte.
- Jeśli są zapięte, należy je odłączyć, obracając i zdejmując z ramki.



- Przytrzymaj maskę przy twarzy, wyrównując jej górną część z grzbietem nosa.
- Załóż uprząż przez głowę, upewniając się, że logo firmy ResMed jest skierowane na zewnątrz.



- Dolne paski ustaw tak, aby znajdowały się pod uszami.
- Ustaw magnesy w pobliżu odpowiednich zacisków na ramce.



- Dopasuj rzepy mocujące na paskach górnych do momentu, kiedy maska będzie ułożona równo i stabilnie.



- Powtórz czynność 4 z dolnymi paskami.



- Podłącz przewód powietrza urządzenia do kolanka, a następnie wciśnij kolanko z przodu maski do momentu kliknięcia.
- Uruchom urządzenie.

Dalsze instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.



Opcje dodatkowe


- Pacjent może umieścić dolną część uprzęży na włosach lub pod włosami, aby dopasować ją do fryzury.

Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru

Maska AirFit F20 jest wyposażona w wymienne części silikonowe w trzech rozmiarach – mały, średni i duży. Modułowa budowa maski AirFit F20 oznacza, że każdy rozmiar silikonu można łatwo założyć na tę samą ramkę. Pozwala to na łatwiejszą wymianę.

Zalecamy posłużenie się szablonem rozmiarów, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie właściwy dla danego pacjenta.

Szablon można pobrać ze strony internetowej [ResMed.com/AirFitF20](https://www.ResMed.com/AirFitF20)

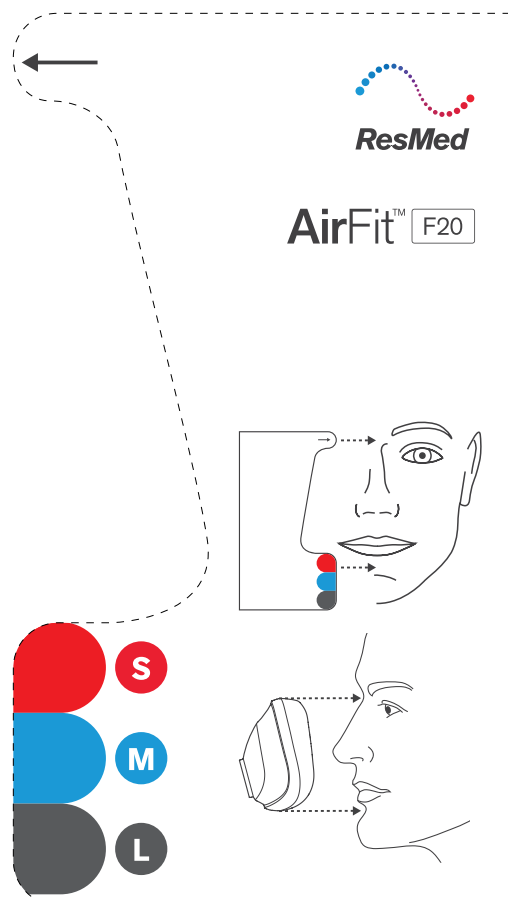

Kody produktów

Europe 3

AirFit F20: mała	63415
AirFit F20: średnia	63416
AirFit F20: duża	63417
AirFit F20 for Her (dla niej): mała	63418
AirFit F20 for Her (dla niej): średnia	63419

Europe 3: angielski, bułgarski, czeski, grecki, węgierski, polski, portugalski, rumuński, hiszpański i turecki

