

**ResMed**

**AirFit™ F30i**

Maska pełnotwarzowa



**To dla tych, którzy śpią aktywnie i chodzą spać o różnych porach.**

Dla nocnych wędrowców, którzy przewracają się i kręcą, a następnie wyskakują z łóżka, aby chwycić dzień.



## Wolność dzięki masce pełnotwarzowej z łącznikiem na szczycie głowy

Przedstawiamy maskę pełnotwarzową AirFit F30i z rurą skierowaną ku górze, dającą pacjentom swobodę ruchu i możliwość spania w dowolnej pozycji<sup>1</sup>, czytania oraz niezakłóconego relaksu. Wyjątkowo kompaktowa wkładka jest odpowiednio wygięta, aby zapewnić wygodę noszenia i dobre uszczelnienie w okolicy nosa pacjenta<sup>1</sup>. Konstrukcja maski AirFit F30i nie ogranicza pola widzenia i zapewnia prawdziwą swobodę ruchu.



## Delikatne i dyskretne podejście

**Maska AirFit F30i eliminuje typowe problemy związane z użytkowaniem masek pełnotwarzowych.** Klaustrofobia, niewygodna, wygląd, poczucie dyskomfortu<sup>2</sup> – maska F30i została zaprojektowana po to, aby przezwyciężyć te i inne trudności.

### Miękka uprząż

Otwarte krawędzie uprząży zapewniają pacjentom wyjątkową miękkość i komfort podczas stosowania maski.

### Mała, ale stabilna forma

Wyjątkowo kompaktowa wkładka opiera się pod nosem, aby zapewnić stabilność ze wszystkich stron<sup>1</sup>, większą swobodę widzenia i mniejszy kontakt z twarzą. Wkładka jest dostępna w czterech rozmiarach pasujących do większości twarzy.

### Złącze ramy

Umożliwia łatwe podłączenie i odłączenie ramy.

### Elastyczny ruch i podciążanie


Specjalnie zaprojektowana rama optymalizuje działanie maski pełnotwarzowej, zapewniając doskonałe efekty terapii.

### Konstrukcja ramy

Specjalnie zaprojektowana rama optymalizuje działanie maski pełnotwarzowej, zapewniając doskonałe efekty terapii.


### Szybkie i dokładne dopasowanie<sup>1</sup>

Zakładanie i zdejmowanie maski jest wygodne i intuicyjne dzięki klipsom magnetycznym<sup>3</sup> pozwalającym sprawnie podłączyć uprząż do ramy.

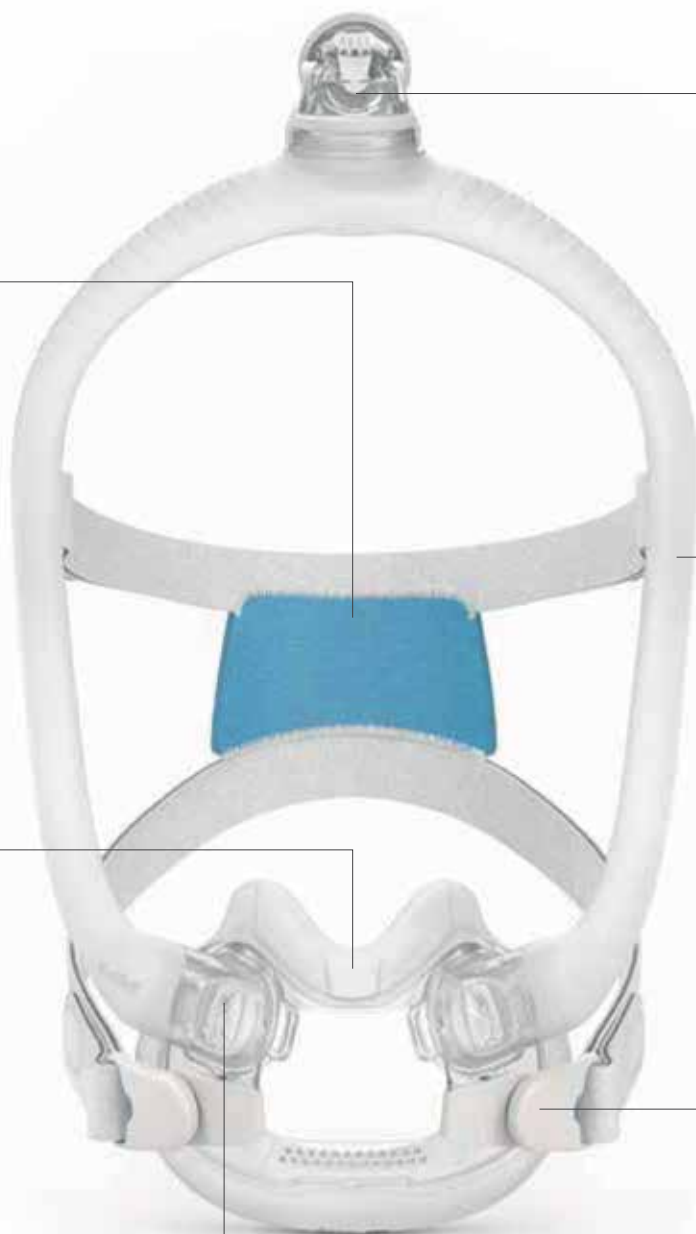



## Kody produktów

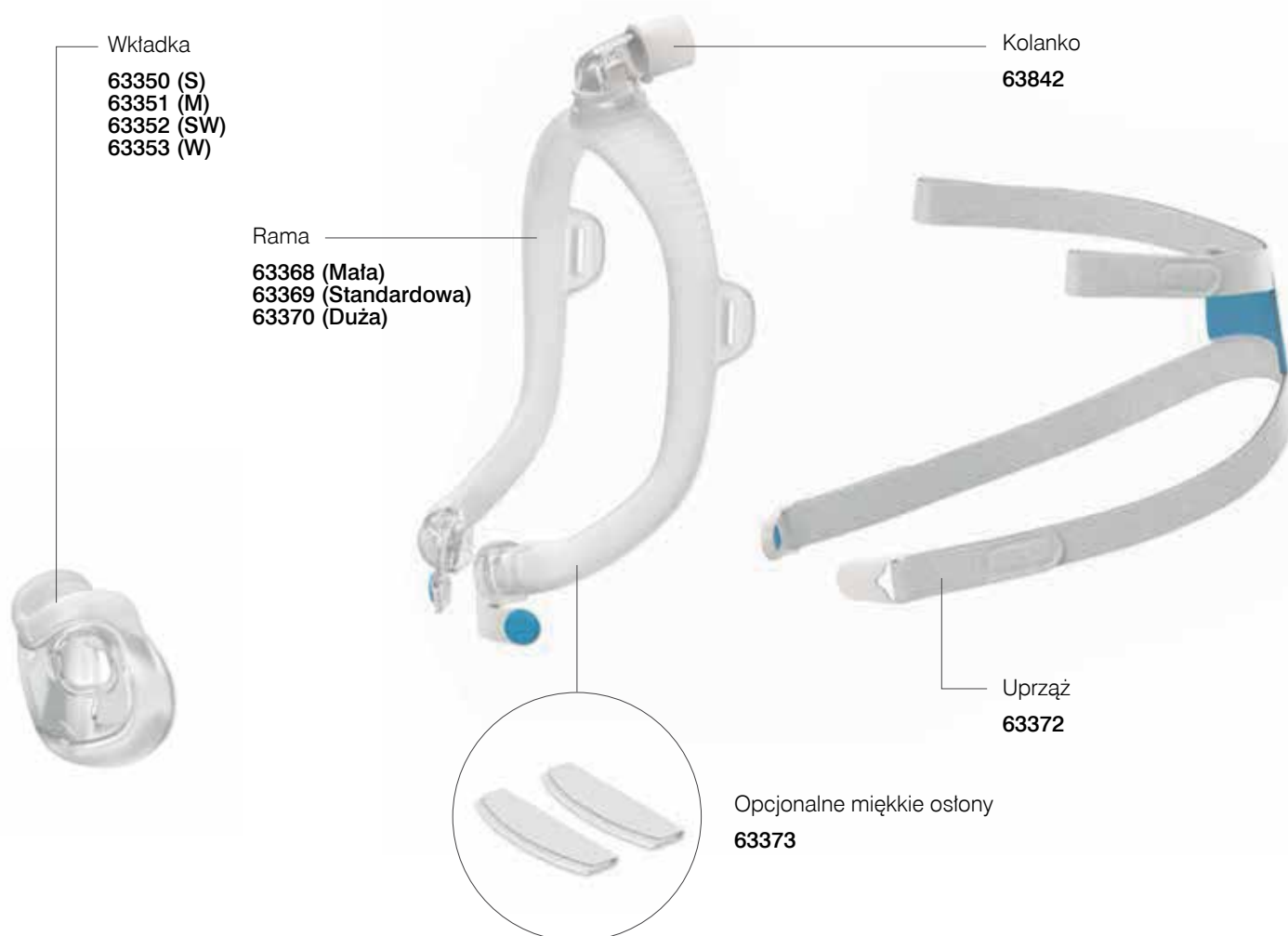

AirFit F30i – system maski			
Rozmiar	Mała wkładka / mała rama	Średnia wkładka / standardowa rama	Szeroka wkładka / standardowa rama
EUROPE*	63310	63312	63313

\*Europa: angielski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki, szwedzki, norweski, fiński, duński, hiszpański, portugalski, czeski, polski i arabski.

## Zachęcający początek


**Maska AirFit F30i pozwala nowym użytkownikom przyzwyczać się do terapii zaburzeń oddychania podczas snu.** Rozwiązania konstrukcyjne zapewniają pacjentom swobodę ruchu i szerokie pole widzenia, nie dając przy tym wrażenia ograniczonych możliwości, co wspiera naturalny sen i ułatwia akceptację.

## Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru

**Maska AirFit F30i jest dostępna z wymiennymi wkładkami w czterech rozmiarach – małym, średnim, małym szerokim i szerokim.** Rama jest dostępna w trzech różnych rozmiarach: małym, standardowym i dużym.

Modułowa budowa maski AirFit F30i oznacza, że każdy rozmiar wkładki można łatwo założyć na ramy w różnych rozmiarach. Pozwala to na łatwiejszą wymianę wkładki.

Zalecamy posłużenie się szablonem rozmiarów, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie właściwy dla danego pacjenta.

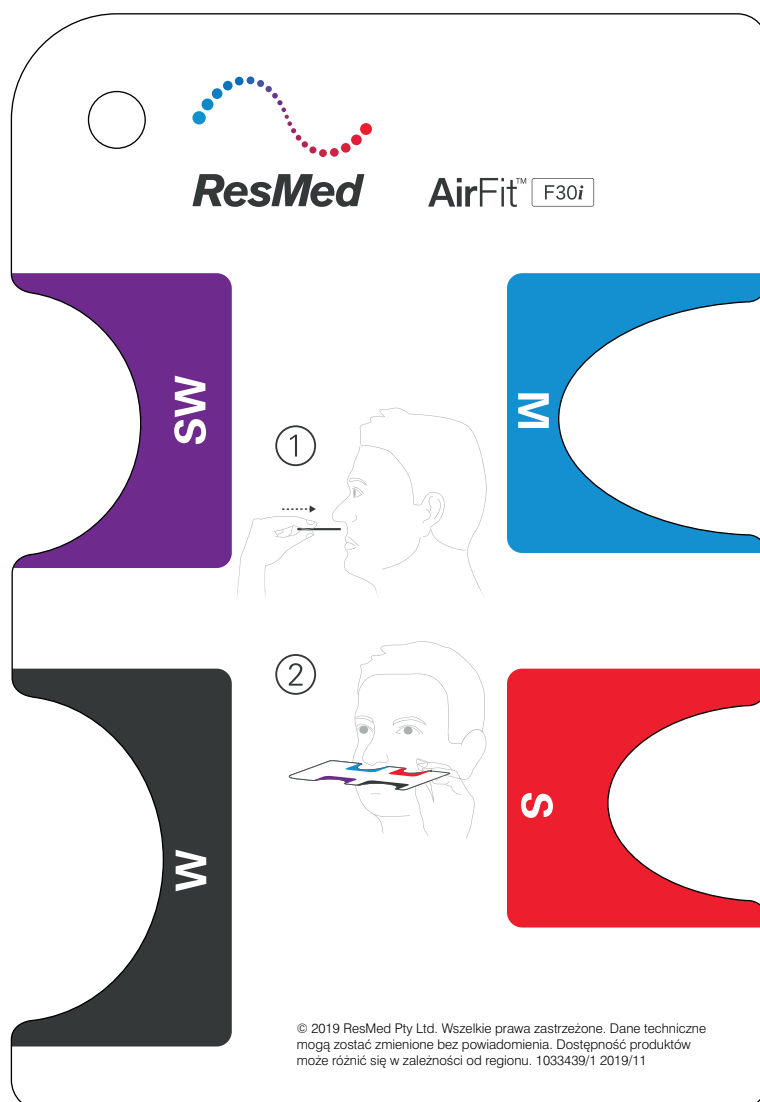

## Instrukcja zakładania maski AirFit F30i



- Przytrzymując jedną ręką dolną część wkładki, a drugą ręką, umieść maskę z przodu twarzy.



- Umieść wkładkę pod nosem tak, aby przylegała do twarzy ierując logo firmy ResMed na uprząży ku górze, naciągnij uprząż i ramę na głowę.



- Poprowadź dolne paski uprząży pod uszami i zamocuj klipsy magnetyczne<sup>3</sup> do łączników w ramie.



- Odepnij uszka mocujące na górnych paskach uprząży i równo pociągnij.



- Powtórz czynność z dolnymi paskami uprząży.
- Upewnij się, że maska jest dobrze dopasowana, ale nie powoduje dyskomfortu.



- Ściśnij przyciski boczne na kolanku i odłącz je od ramy. Podłącz rurę z urządzenia do kolanka, a następnie podłącz je ponownie do ramki.

Dalsze instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.



## Opcje dodatkowe

- W przypadku pacjentów z długimi włosami zaleca się przełożenie ich przez tylną część uprząży, tak jak pokazano na zdjęciu. Jeśli włosy są spięte w kucyk, należy upiąć go odpowiednio wysoko, aby można było wprowadzić go przez tylną część uprząży.
- Dalsze instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika. Opis wskaźników, przeciwwskaźników, ostrzeżenia i środki ostrożności można znaleźć w pełnej informacji o produkcie.



To dla nich

1 Zewnętrzne badanie kliniczne firmy ResMed z udziałem 51 użytkowników pełnotwarzowych masek CPAP przeprowadzone w dniach 24.10.2018 r. – 20.11.2018 r., dane z badań własnych; ID A4484728.

2 Wimms A. et al., Impact of a New Nasal Pillows Mask on Patients' Acceptance, Compliance, and Willingness to Remain on CPAP Therapy, Sleep Disord, 2016 r. 2016: p. 6713236.

3 Stosowanie masek z elementami magnetycznymi jest przeciwwskazane u pacjentów, u których wcześniej występowały następujące schorzenia: metalowy klips hemostatyczny wszczepiony w głowę w celu leczenia tętniaka i/lub metalowe odłamki w jednym lub obu oczach

AirFit jest znakiem towarowym firmy ResMed Pty Ltd.



**ResMed Polska sp. z o.o.**  
ul. Pokorna 2/U18A, 00-199 Warszawa  
tel.: +48 22 539 22 00 email: [biuro@resmed.pl](mailto:biuro@resmed.pl)

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.  
© 2019 ResMed Pty Ltd. 101 11770/1 2019-12  
[ResMed.com/AirFit30](https://www.resmed.com/AirFit30)



[www.zdrowysen.info](http://www.zdrowysen.info)