

ResMed

AirFit™ N30

Maska donosowa z wkładką



Oto maska dla minimalistów ceniących proste rozwiązania. Dla wielbicieli nocnego odpoczynku, którzy zakładają maskę tak szybko, jak zapadają w sen i budzą się pełni energii.



Wyjątkowo kompaktowa, minimalistyczna maska

ResMed AirFit N30 to wyjątkowo kompaktowa maska donosowa z wkładką umożliwiającą dyskretne i wygodne podłączenie do aparatu CPAP¹, wyposażona w odpowietrznik QuietAir™ eliminujący zakłócenia snu spowodowane hałasem. Model N30 odznacza się prostą konstrukcją złożoną z ramy, regulowanej upręży oraz wkładki podnosowej w trzech rozmiarach, co ułatwia zakładanie maski i minimalizowanie niezamierzonych przecieków. Mała, dyskretna maska AirFit N30 stanowi świetną alternatywę dla tradycyjnej wkładki donosowej lub poduszeczkowej.

ResMed.com



Łatwe dopasowanie

Prosta konstrukcja maski AirFit N30 sprawia, że można ją szybko i łatwo dopasować do pacjenta¹. Różne rozmiary wkładek w modelu N30 zapewniają doskonałe przyleganie u zdecydowanej większości pacjentów. Dokładne dopasowanie przy pierwszej wizycie pomaga zredukować liczbę ponownych wizyt i poprawek.

Regulowana uprząż

Uprząż jest wykonana z miękkiego materiału i można ją dostosować do kształtu twarzy



Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja części podnosowej

Miękka wkładka donosowa z podkładką umieszczana jest bezpiecznie pod nosem pacjenta, zapewniając delikatną, a przy tym skuteczną terapię oraz dobre uszczelnienie¹.



Strategicznie rozmieszczone i ciche odpowietrzniki


Zaawansowany odpowietrznik QuiteAir delikatnie i cicho odprowadza powietrze poza maskę^{1,2}.

Elastyczna rura

Model N30 jest wyposażony w krótką i lekką rurę, która zapewnia pacjentom swobodę ruchu.

Dzielona membrana grzbietowa

Starannie zaprojektowana membrana we wkładce podnosowej z podkładką gwarantuje wygodę i dobre uszczelnienie¹.

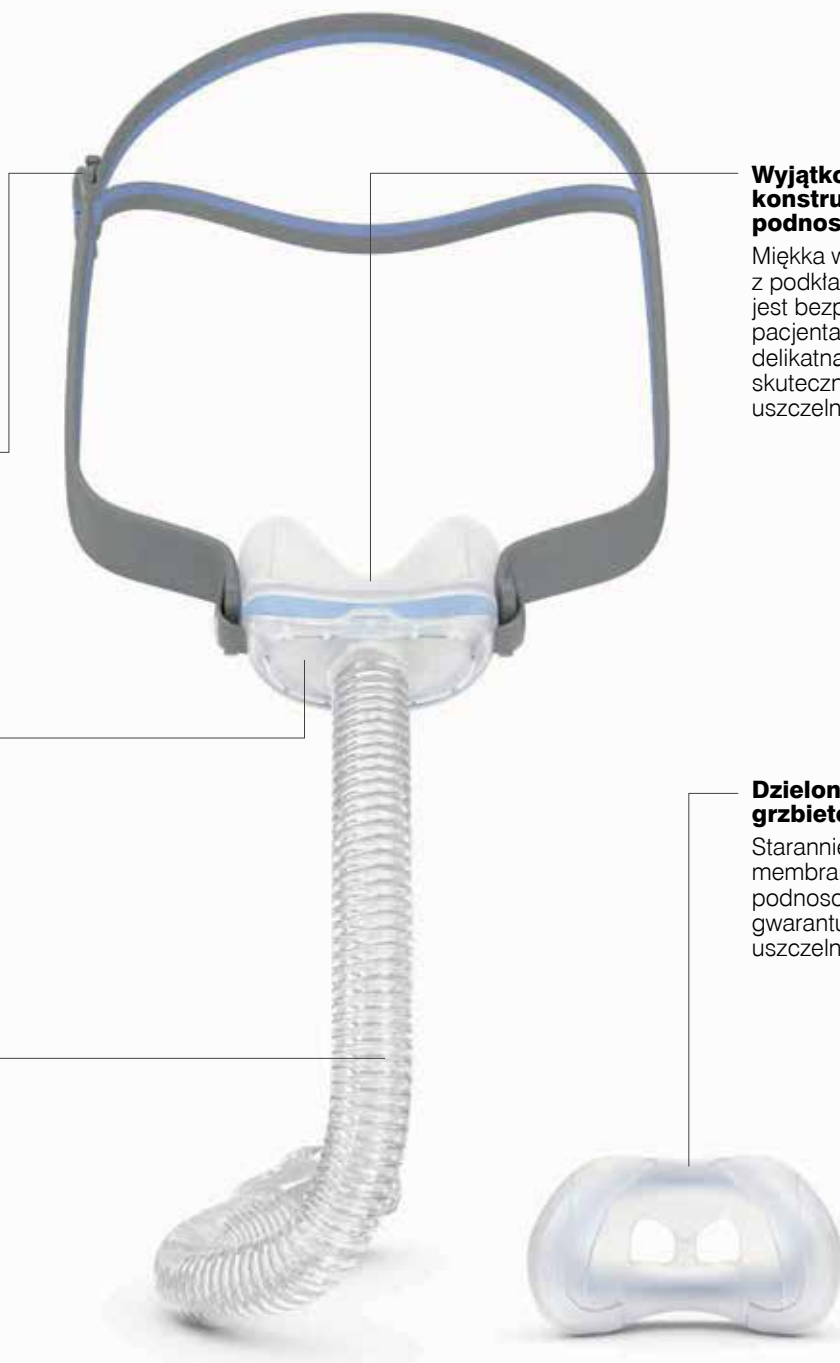



Minimalistyczna konstrukcja dla prostej obsługi

Maska AirFit N30 składa się tylko z trzech elementów: ramy, regulowanej uprząży i wkładki dostępnej w trzech rozmiarach oznaczonych różnymi kolorami. Wygodny zestaw startowy zawiera wkładki małą i średnią. Małą szeroką wkładkę można nabyć oddzielnie.

System maski*
z odpowietrznikiem
QuietAir

64204

wkładka z
odpowietrznikiem
standardowym

64205

Regulowana
uprząż

64216

Rama z odpowietrznikiem
QuietAir

64219

Rama z odpowietrznikiem
standardowym

64220

Wkładki

64213 (S – mała)

64214 (M – średnia)

64215 (SW – mała szeroka)


* System maski składa się z wkładek małej i średniej, ramy i uprząży. Małą szeroką wkładkę można nabyć oddzielnie.

Łatwe dopasowanie

Prosta konstrukcja maski AirFit N30 sprawia, że można ją szybko i łatwo dopasować do pacjenta¹. Różne rozmiary wkładek w modelu N30 zapewniają doskonałe przyleganie u zdecydowanej większości pacjentów. Dokładne dopasowanie przy pierwszej wizycie pomaga zredukować liczbę ponownych wizyt i poprawek.


Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru

Maska AirFit N30 jest wyposażona w trzy wymienne wkładki – małą, średnią i małą szeroką. Zalecamy posłużenie się szablonem rozmiarów, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie właściwy dla danego pacjenta.

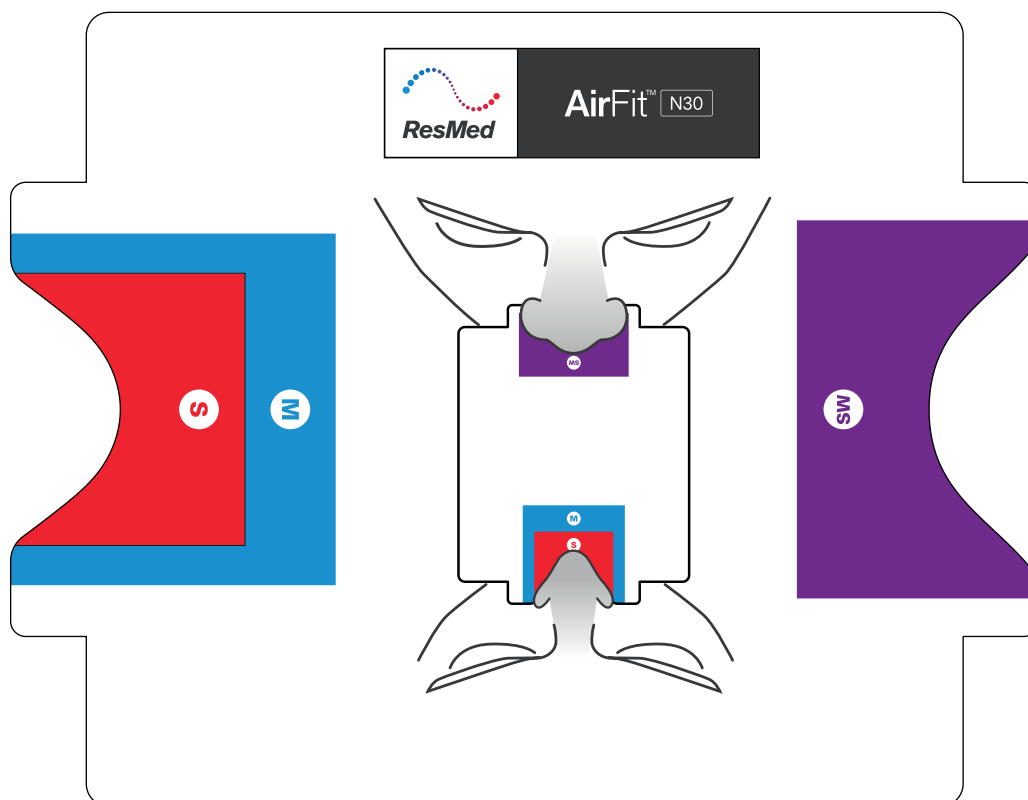

Europe 1: angielski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki, szwedzki, norweski, fiński, duński, hiszpański, portugalski, czeski, polski i arabski.

Instrukcja zakładania maski AirFit N30

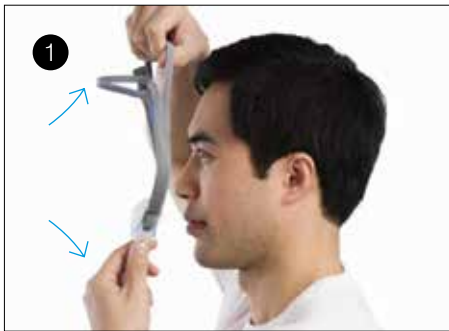


- Trzymając wkładkę donosową z podkładką z dala od nosa, upewnij się, że wkładka (w rozmiarze małym, średnim lub małym szerokim) oraz oznaczenia lewej (L) i prawej (R) strony są ustawione w kierunku twarzy. Umieść wkładkę donosową z podkładką pod nosem.



- Załóż regulowaną uprząż na głowę, przytrzymując dolną taśmę i umieszczając ją w tylnej części głowy. Górna taśma powinna być umieszczona wygodnie na szczycie głowy.



- Odciągnij wkładkę donosową z podkładką, a następnie ponownie umieść ją pod nosem, aby zapewnić idealne przyleganie.

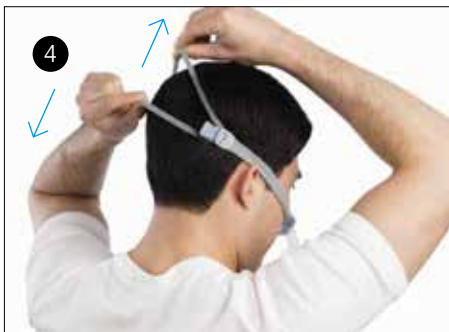

- W celu zapewnienia wygodnego dopasowania rozsuń taśmy uprząży, aby poluzować maskę lub przybliżyć je do siebie, aby przyleganie było mocniejsze.



- Jeśli maska nie jest szczelna, wyreguluj uprząż przy użyciu zacisku. Maską powinna dobrze przylegać do twarzy, ale nie powodować dyskomfortu spowodowanego zbyt dużym uciskiem. Od czasu do czasu uprząż może wymagać regulacji.



- Maska jest teraz założona i gotowa do użycia.

Dalsze instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.



Opcje dodatkowe

- W przypadku pacjentów z długimi włosami zaleca się przelożenie ich przez tylną część uprząży.
- Jeśli włosy są spięte w kucyk, należy upiąć go odpowiednio wysoko, aby można było umieścić go wygodnie pomiędzy paskami uprząży.



To dla nich

1 Zewnętrzne 7-dniowe badanie kliniczne firmy ResMed z udziałem 18 pacjentów, przeprowadzone w dniach 12.02.2019 r. – 25.05.2019 r., dane z badań własnych; ID A4547452.
2 Poziom hałasu 25 dBA – instrukcja dla użytkownika AirFit N30, ResMed Pty Ltd 2019. ID A4647676.

AirFit i QuietAir to znaki towarowe firmy ResMed Ltd.



ResMed Polska sp. z o.o.
ul. Pokorna 2/U18A, 00-199 Warszawa
tel.: +48 22 539 22 00 email: biuro@resmed.pl

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
© 2019 ResMed Pty Ltd. 10111625/1 2019-10
[ResMed.com/AirFit30](https://www.resmed.com/AirFit30)



www.zdrowysen.info